

### Ändamål

Wako NEFA Standard är avsedd att användas i kombination med NEFA-HR(2)-reagensen för kvantitativ bestämning av de fria fettsyrorna (FFA) i serum.

### Reagenser och innehåll

CAL: 2 x 10 ml.  
Innehåll: Oleinsyra, stabilisator

### Reagens preparation

Standarden levereras i vätskeform.

### Börvärden och deras bestämning

Börvärden: se flaskans etikett.  
Kan återföras till Wako-intern standard.

### Lagringsförhållanden

Lagring vid 2–10 °C.  
Utgångsdatum: se etikett på flaska eller förpackning.

### Varningar och försiktighetsåtgärder

- Endast för *in-vitro*-tillämpningar.
- Detta test får användas endast av kvalificerad yrkespersonal. Tillämpliga nationella och regionala föreskrifter och lagar gäller.
- Får ej användas på människa eller djur *in-vivo*.
- Använd inte reagenser med ett utgångset bäst-före-datum på förpackningen.
- Kalibreraren får inte användas för andra ändamål än det här beskrivna.
- Denna produkt innehåller natriumacid som konserveringsmedel. Natriumacid kan bilda explosiva blandningar med koppar eller bly. Även om reagenserna innehåller endast minimala mängder natriumacid, måste avloppen spolas med rikligt med vatten när reagenserna kasseras.
- Sköj omedelbart med mycket vatten om kalibreraren kommer i kontakt med mun, ögon eller hud. Kontakta läkare vid behov.
- Vid kasseringen av reagenserna skall tillämpliga lokala eller nationella föreskrifter beaktas.

### Beställningsinformation

Best.-nr	Produkt	Innehåll
270-77000	NEFA Standard	CAL: 2 x 10 ml