

Προβλεπόμενη χρήση

Ο έλεγχος συμπληρώματος Wako προορίζεται για χρήση ως δοκιμασμένος ορός ποιοτικού ελέγχου στο κλινικό εργαστήριο για την παρακολούθηση της ακρίβειας της δοκιμής συμπληρώματος με χρήση του κιτ δοκιμής Wako Autokit CH50.

Αντιδραστήρια και συστατικά

Έλεγχος συμπληρώματος L: 10 φιάλες x για 0,5 mL
Έλεγχος συμπληρώματος H: 10 φιάλες x για 0,5 mL

Περιέχει ανθρώπινο ορό.

Προετοιμασία αντιδραστηρίων

Προσθέστε με ακρίβεια 0,5 mL απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού για να διαλύσετε το περιεχόμενο κάθε ενός από τους ελέγχους.

Αποθήκευση και σταθερότητα

Ο έλεγχος συμπληρώματος Wako θα παραμείνει σταθερός μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα του φιαλιδίου, όταν διατηρείται κλειστό στους -10 °C ή χαμηλότερα. Αφού ανασυσταθεί ο έλεγχος, διατηρήστε το διάλυμα σε πάγο για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αποθηκεύστε το στους 2-10 °C και χρησιμοποιήστε το εντός 8 ωρών.

Περιορισμοί

Εάν υπάρχουν ενδείξεις μικροβιακής μόλυνσης ή υπερβολικής θολερότητας στον ανασυσταθέντα έλεγχο, απορρίψτε το φιαλίδιο.

Αντιστοίχιση τιμών

Οι τιμές και τα αποδεκτά εύρη που αναγράφονται στις ετικέτες των φιαλιδίων προέκυψαν από επαναληπτικές αναλύσεις και είναι συγκεκριμένα για αυτή την παρτίδα του ελέγχου συμπληρώματος Wako. Δεδομένου ότι η απόδοση αντανακλά τις παραλλαγές του οργάνου, του αντιδραστηρίου, της τεχνικής και της μεθόδου, συνιστάται κάθε εργαστήριο να καθορίζει τις δικές του τιμές και τα δικά του αποδεκτά εύρη. Οι τιμές και τα αποδεκτά εύρη που αναγράφονται στις ετικέτες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγός.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- Για επαγγελματική χρήση.
- Να μην χρησιμοποιείται εσωτερικά σε ανθρώπους και ζώα.
- Για την παρασκευή αυτού του προϊόντος χρησιμοποιήθηκε ανθρώπινος ορός. Ο ακατέργαστος ανθρώπινος ορός που χρησιμοποιήθηκε ελέγχθηκε και βρέθηκε αρνητικός για HBsAg, αντίσωμα κατά του HIV και αντίσωμα κατά του HCV. Επειδή καμία δοκιμασία δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο αίμα δεν θα μεταδώσουν μολυσματικούς παράγοντες, συνιστάται ο χειρισμός του προϊόντος να γίνεται με τις ίδιες προφυλάξεις βιολογικού κινδύνου που χρησιμοποιούνται για τα δείγματα ασθενών.
- Κατά την απόρριψη των αντιδραστηρίων, απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

- Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες

- αλβουμίνες, ορού αίματος
- βορικό οξύ (SVHC)

Εικονογράμματα κινδύνου

GHS07



GHS08

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

Δηλώσεις προφυλάξεων

- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Πληροφορίες παραγγελίας

Κωδικός αριθ.	Προϊόν	Συσκευασία
991-43701	Έλεγχος συμπληρώματος	L: 10 x για 0,5 mL (Χαμηλό) H: 10 x για 0,5 mL (Υψηλό)